

Clearblue® PLUS

con **PUNTA CHE CAMBIA COLORE**

- Clearblue® PLUS ha un'accuratezza superiore al 99% dal giorno previsto per le mestruazioni.
 - Clearblue® PLUS può essere utilizzato a partire da 5 giorni prima dell'eventuale ritardo delle mestruazioni.
- Leggi attentamente questo foglio illustrativo prima di eseguire il test.

Test di gravidanza

Prima di iniziare

Quando esegui il test, può essere utile avere un orologio a portata di mano.

1 ESECUZIONE DEL TEST

Se esegui il test dal giorno previsto per le mestruazioni, puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno. Se esegui il test prima del giorno previsto per le mestruazioni, usa la prima urina del giorno. Quando sei pronta a eseguire il test, estrai lo stick per il test dall'involucro di alluminio e rimuovi il cappuccio blu. Utilizza immediatamente il test.

TEST NEL FLUSSO DI URINA

Puoi eseguire il test direttamente nel flusso di urina, oppure in un campione di urina raccolto in un contenitore asciutto e pulito.

- Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso nel flusso di urina, oppure nel campione di urina raccolto, come mostrato, contando **5 secondi interi**.
- La punta che cambia colore diventa immediatamente rosa per mostrare che l'urina viene assorbita. **Devi continuare a tenere la punta**

Cappuccio

Punta che cambia colore



che cambia colore nell'urina per 5 secondi interi.



Devi continuare a tenere la punta che cambia colore nell'urina per 5 secondi interi.



Inizia a contare i 5 secondi non appena vedi diventare rosa la punta che cambia colore.

Flusso di urina **OPPURE** Campione raccolto

- Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso o appoggia il test su una superficie piana finché non sei pronta per leggere il risultato e non è apparsa una linea blu nella finestra di controllo.
- Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio.

Se la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa, fai riferimento alla **domanda 7**.

2

3
minuti

ATTENDI 3 MINUTI.

Man mano che il test procede, vedrai che inizieranno a svilupparsi delle linee blu.

3

3 LETTURA DEL RISULTATO

Puoi leggere il risultato nella finestra del risultato.

Quando leggi il risultato, nella finestra di controllo deve essere presente una linea blu. Questa linea mostra che il test ha funzionato.

Il risultato 'Incinta' potrebbe apparire entro 1 minuto se il test viene eseguito dal giorno in cui si sarebbe riscontrato un ritardo nelle mestruazioni (cioè il giorno successivo a quello in cui erano previste le mestruazioni non avvenute).

Per confermare un risultato 'Non incinta' o quando esegui il test prima di aver riscontrato l'assenza delle mestruazioni, devi attendere per 3 minuti interi (fai riferimento alla **domanda 11**).

Se nella finestra di controllo non appare alcuna linea blu entro **10 minuti**, il test non ha funzionato (fai riferimento alla **domanda 8**).

Finestra del risultato

Finestra di controllo



NON INCINTA

INCINTA



Se il tuo risultato è 'Non incinta', fai riferimento alla **domanda 13** in Domande e risposte.

Immagine A

Se il tuo risultato è 'Incinta', fai riferimento alla **domanda 14** in Domande e risposte.

Immagine B

Immagine C

Non importa se una delle linee che formano il simbolo '+' è più chiara o più scura dell'altra; il risultato è 'Incinta'.

IMPORTANTE! Leggi il risultato entro **10 minuti** dall'esecuzione del test.

Ignora tutti i cambiamenti del risultato che si sono verificati successivamente. Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, fai riferimento alla **domanda 9** per i dettagli completi.

Domande e risposte

- 1 Qual è l'accuratezza di Clearblue® PLUS?**
Clearblue® PLUS ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio, quando viene usato dal giorno in cui erano previste le mestruazioni.
- 2 Come funziona Clearblue® PLUS?**
Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana). La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Clearblue® PLUS può rilevare quantità minime di questo ormone presenti nell'urina (la sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml).
- 3 Quando posso eseguire il test con Clearblue® PLUS?**
Clearblue® PLUS può essere usato fino a 5 giorni prima dell'eventuale ritardo delle mestruazioni (cioè 4 giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni). Se esegui il test prima del giorno in cui è previsto l'inizio delle mestruazioni e ottieni un risultato 'Non incinta', esiste ancora una possibilità che tu sia incinta. Fai riferimento alla tabella che segue per i risultati dei test clinici di Clearblue® PLUS con campioni raccolti nelle primissime fasi della gravidanza.

| Test eseguito in anticipo | |
|--|---|
| Numero di giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni | % di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato 'Incinta' |
| -1 | 98 % |
| -2 | 97 % |
| -3 | 88 % |
| -4 | 56 % |

- 4 Devo utilizzare un campione di urina raccolto la mattina presto?**
Se esegui il test prima del giorno previsto delle mestruazioni, ti consigliamo di eseguire il test con la prima urina del giorno. Altrimenti puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno. Evita un'eccessiva assunzione di liquidi prima di eseguire il test.

- 5 Non sono sicura del giorno in cui sono previste le prossime mestruazioni. Come posso sapere che sto eseguendo il test nel momento giusto?**

Per calcolare quando sono previste le mestruazioni, calcola la lunghezza normale del tuo ciclo mestruale contando il numero di giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo.

- Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo mestruale più lungo degli ultimi mesi.
- Se non hai alcuna idea del giorno in cui sono previste le mestruazioni, ti raccomandiamo di eseguire il test non prima di 19 giorni dall'ultimo rapporto sessuale non protetto.
- Se il risultato è 'Non incinta' e sospetti comunque una gravidanza, *fai riferimento alla domanda 13.*

- 6 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?**

- Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
- I farmaci per la fertilità contenenti hCG possono produrre risultati fuorvianti (i farmaci per la fertilità vengono solitamente somministrati per iniezione e un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato 'Incinta').
- Altre terapie per l'infertilità (come il citrato di clomifene), antidiuretici e contraccettivi ormonali (come la pillola anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.
- Se hai smesso recentemente di usare contraccettivi ormonali o hai in corso terapia per l'infertilità, ad esempio con citrato di clomifene, le tue mestruazioni potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.
- Se di recente sei stata incinta (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato 'Incinta'.
- La gravidanza ectopica, le cisti ovariche, la menopausa e alcune condizioni mediche estremamente rare potrebbero produrre risultati fuorvianti.
- Se ottieni il risultato 'Incinta', è possibile che in seguito riscontri di non essere incinta a causa di un'interruzione naturale della gravidanza che si è verificata durante le prime fasi.

Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

- 7 Wo utilizzato il test di gravidanza ma la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa. Che cosa devo fare?**

Se la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa, l'urina utilizzata potrebbe essere stata insufficiente. Tuttavia, se nella finestra di controllo appare la linea blu entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test ha funzionato. Se non appare alcuna linea blu nella finestra di controllo entro 10 minuti dall'esecuzione del test, *fai riferimento alla domanda 8.*

- 8 Wo utilizzato il test di gravidanza ma non è apparsa alcuna linea blu nella finestra di controllo. Che cosa devo fare?**

Se non è presente alcuna linea blu nella finestra di controllo entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test non ha funzionato. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- La punta che cambia colore non è stata rivolta verso il basso, oppure il test non era stato appoggiato su una superficie piana dopo l'applicazione dell'urina.
- È stata utilizzata troppa o troppa poca urina. **Il campionamento deve durare 5 secondi.**

Durare 5 secondi.

Davi messeggi il test, usando un nuovo stick per il test e seguendo le istruzioni con attenzione. Puoi anche raccogliere un campione di urina in un contenitore asciutto e pulito e immergervi per 5 secondi la punta che cambia colore.

- 9 Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?**

Perché il tuo risultato sia 'Incinta', entro 10 minuti dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e un simbolo '+' nella finestra del risultato.

L'aspetto del simbolo '+' nella finestra del risultato può variare, ma le linee che compongono il simbolo '+' e la linea nella finestra di controllo devono avere larghezze simili (vedere le immagini A-C).

Immagine A

Questo indica il risultato 'Incinta'. Questo risultato è più probabile quando esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, quando il livello di hCG potrebbe essere relativamente basso.

Immagine B

Questo risultato non è insolito se sei incinta ed esegui il test nel giorno in cui sono previste le mestruazioni o nei giorni vicini, in quanto il livello di hCG potrebbe essere ancora relativamente basso.

Immagine C

Questo risultato è più probabile se sei incinta ed esegui il test svariati giorni dopo il giorno in cui sono previste le mestruazioni, poiché il livello di hCG è più alto.

Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con cura le istruzioni.

- Perché il tuo risultato sia 'Non incinta', entro 10 minuti dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e un simbolo '-' (meno) nella finestra del risultato. Se il risultato è 'Non incinta' e sospetti comunque una gravidanza, *fai riferimento alla domanda 13.*

- 10 Che cosa potrebbe influire sull'accuratezza del risultato?**

Se esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, l'accuratezza di Clearblue® PLUS è inferiore. Se non prelevi un campione di urina per un periodo di tempo sufficiente, è possibile che il risultato ottenuto non sia affidabile. Tuttavia, se entro 10 minuti dall'esecuzione del test appare una linea blu nella finestra di controllo, il risultato è affidabile. Se ottieni ripetutamente risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico. Inoltre, *fai riferimento alla domanda 6.*

- 11 Quando posso leggere il risultato?**

Il risultato 'Incinta' potrebbe apparire entro 1 minuto se il test viene eseguito dal giorno in cui si riscontra il ritardo delle mestruazioni (cioè il giorno successivo a quello in cui erano previste le mestruazioni che non sono avvenute). Prima di leggere il risultato, assicurati che nella finestra di controllo sia presente anche una linea blu. Per confermare un risultato 'Non incinta', o quando esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, **devi** attendere per 3 minuti. Se nella finestra di controllo non appare alcuna linea blu entro **10 minuti**, il test non ha funzionato (*fai riferimento alla domanda 8*).

- 12 Quanto rimane visibile il risultato?**

Il risultato può essere letto in qualsiasi momento, da 3 a 10 minuti. Dopo 10 minuti, qualsiasi cambiamento nel risultato deve essere ignorato.

- 13 Il test indica 'Non incinta'. Che cosa devo fare?**

Potresti non essere incinta oppure il livello di ormone della gravidanza potrebbe non essere ancora abbastanza alto da poter essere rilevato, o potresti aver calcolato male il giorno previsto per le mestruazioni.

- Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel giorno previsto per le mestruazioni.
- Se il giorno in cui erano previste le mestruazioni è già trascorso, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato 'Non incinta' e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

- 14 Il test dice che sei 'Incinta'. Che cosa devo fare?**

Se il test dice che sei incinta, dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare.



www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00 - 16:00, festivi esclusi.

0800 102 865

Gratiso da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto.

| | | | | | |
|-----|---|-----|------------------|--|------------------|
| IVD | Dispositivo medico diagnostico per esami in vitro | LOT | Codice lotto | | Non riutilizzare |
| | Limiti di temperatura 2°C - 30°C | | Data di scadenza | | Produttore |

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD. © 2015 SPD Tutti i diritti riservati

Per le fasi successive, informazioni e consigli generali sulle problematiche della gravidanza, visita il nostro sito web all'indirizzo:

www.clearblue.com

Questo dispositivo è per uso domestico.

Conservare a temperatura ambiente.

Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Solo per uso diagnostico in vitro.

Smettere insieme ai rifiuti domestici comuni.

Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.

Non utilizzare il test oltre la data di scadenza.



0843